

Masques chirurgicaux type IIR

Protection contre les projections, les éclaboussures et les substances infectieuses

Dispositif médical de classe I à usage unique NF EN 14683:2019+AC:2019 - Type II

Ce masque de haute qualité et haute filtration évite la projection de postillons émis par le porteur et limite ainsi la contamination des autres personnes et de l'environnement. Masque chirurgical avec fixations élastiques et barrette nasale pour un meilleur maintien.

Conditionné en boîte distributrice de 50 masques.

Exigences

Les masques répondent aux exigences ci-dessous :

Données à respecter	Référentiel	Niveau exigé
Efficacité de filtration (EFB - %)	EN 14683:2019 +AC:2019	≥ 98%
Pression différentielle Delta P (Pa/cm ²)		< 60
Pression de la résistance aux projections - Splash (kPa)		> 16
Propreté microbienne (UFC/g)		< 30

Mode d'emploi du masque

Bien se laver les mains avant la mise en place du masque.

01. Placer le masque sur le visage (barrette en haut, soudure élastique vers l'extérieur) et positionner les sangles élastiques derrière les oreilles.

02. Ajuster la barrette au contour du nez avec les index.

03. S'assurer que le masque couvre le haut du nez et le dessous du menton.

Précautions d'emploi

Si le masque n'est pas ajusté correctement, il est recommandé de ne pas l'utiliser.

Ne pas toucher le masque ou le visage pendant l'utilisation.

Changer le masque toutes les 4h ou dès qu'il est mouillé.


En cas de réaction ou de gêne pendant son utilisation, retirer immédiatement le masque.

Si les symptômes persistent, contacter immédiatement votre médecin traitant.

Le masque se retire par les élastiques.

Ce produit n'est ni lavable, ni réutilisable : après chaque utilisation, jeter le masque dans une poubelle fermée et se laver les mains soigneusement.

En cas d'incident grave survenu en lien avec son utilisation, veuillez nous le notifier et en informer les autorités compétentes.

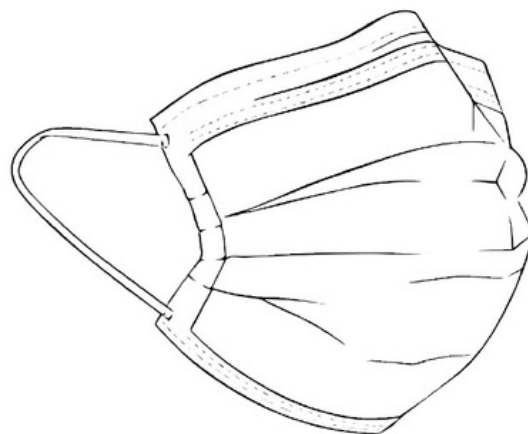

Composition

- Spunbound, polypropylène
- Meltblown, polypropylène
- Élastiques elastane + polypropylène
- 2 fils d'acier, polypropylène
- Absence de latex, bisphénols et phtalates

Conditions de conservation et de stockage

- Ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil.
- Doit être conservé à une température entre +5° et +40°C
- Durée de vie du produit : 5 ans



1. Se laver les mains avant de le toucher



2. Déployer le masque



3. Placer les élastiques derrière vos oreilles



4. Ajuster la barrette nasale



5. Temps maximal recommandé